

HEROTAG®

Bedienungsanleitung



1. Case mit beiden Daumen von oben nach unten aus der Klammer schieben.




2. In einer Case-Hälfte befindet sich eine einzeln verpackte Einmalbeatmungsfolie, in der anderen Case-Hälfte befinden sich ein verpacktes Paar Einweghandschuhe.



3. Zuerst die Umverpackung der Einweghandschuhe oben aufreißen und die Einweghandschuhe anziehen (Eigenschutz). Im Anschluss die Umverpackung der Beatmungsfolie oben aufreißen und die Beatmungsfolie entnehmen und ausbreiten.




4. Die Case-Hälfte mit der großen Öffnung flach auf den in der Beatmungsfolie eingearbeiteten Filtervlies drücken und gleichzeitig die andere Case-Hälfte von der anderen Seite der Beatmungsfolie bis zu einem deutlichen Klickgeräusch dagegen stecken, so dass die Case-Hälften jeweils von einer Seite das Filtervlies einklemmen.

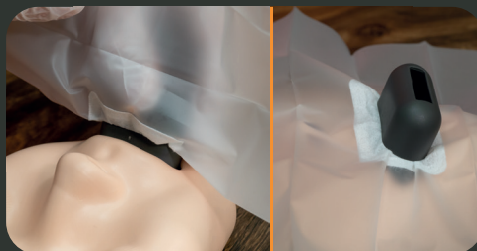

5. Die Beatmungsfolie mit den angesteckten Case-Hälften waagrecht zum Mund auf dem Gesicht der hilfebedürftigen Person positionieren und die jetzt untenliegende Case-Hälfte leicht so weit in den geöffneten Mund der hilfebedürftigen Person stecken, bis das Filtervlies bündig auf dem Mund der hilfebedürftigen Person aufliegt.



6. Optional bei Verwendung der Nasenklammer (Bei Beatmung ohne Nasenklammer weiter mit Punkt 7). Die farbige (Nasen)-Klammer zwischen Zeigefinger und Daumen haltend und mit der Öffnung nach unten beginnend von der Nasenwurzel bis zu den Nasenflügeln schieben, so dass die Nase der hilfebedürftigen Person verschlossen ist.

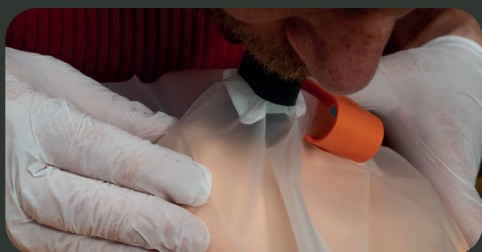

7. Den Kopf der hilfebedürftigen Person nackenwärts beugen, mit dem eigenen Mund die oben herauschauende Case-Hälfte umschließen und die Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen. Hinweis: Ohne Verwendung der Nasenklammer muss bei der Mund-zu-Mund-Beatmung zusätzlich noch die Nase der hilfebedürftigen Person zugehalten werden.

8. Herz-Lungen-Wiederbelebung mit dem HEROTAG® durchführen, bis der Rettungsdienst eintrifft oder die hilfsbedürftige Person wieder ansprechbar ist.

